

1 Підготовка до збору генетичного матеріалу


- За 1,5-2 години утримайтеся від споживання їжі, чищення зубів та паління
- Перед збором генетичного матеріалу прополощіть ротову порожнину теплою водою та ретельно вимийте руки
- * Для збору генетичного матеріалу у немовляти: проводити процедуру необхідно не раніше як за 30 хвилин після годування, попередьон напоївши дитину теплою водою.

2 Збір генетичного матеріалу



- Необхідно дістати зонд з ватним наконечником з упаковки: відкрийте кришку та витягніть зонд з пробірки за ручку-тримач

Не торкайтесь ватного наконечника, щоб не занести на нього сторонній біологічний матеріал

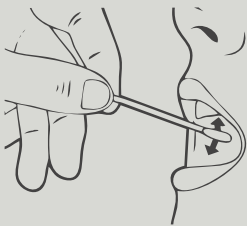


- Руками, що обертаються, з легким натиском, ведіть ватним наконечником по внутрішній стороні щоки (необхідно зробити 20-30 обертів протягом 30 секунд)

Ваша мета – зібрати клітини з внутрішнього боку щоки, а не слину

- Дайте зонду просохнути не менше 10 хвилин: не допускайте контакту ватного наконечника з навколишніми поверхнями
- Повторіть процедуру з зондами, що залишилися, зібравши генетичний матеріал з другої щоки

Не кладіть зонди в конверт відразу - дайте їм просохнути щонайменше 10 хвилин

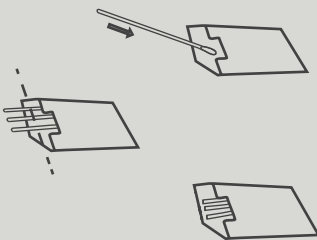

- Помістіть зонди у маленький зелений конверт із комплекту (повертати їх у пробірки не потрібно)
- Відріжте частини зондів, що виступають з конверта так, щоб ватні наконечники залишилися в конверті
- Закрийте конверт і помістіть його у великий білий конверт для надсилання

3 Надішліть конверт до нашої клініки

- За насамперед обговореним шляхом передачі Вашого генетичного матеріалу, надішліть конверт у клініку Butterfly of London за наступною адресою: Україна, м.Київ, провулок Академіка Філатова 3/1. Клініка Апаратної Косметології "Butterfly of London"



butterflyoflondon@gmail.com



+38(097)801-68-68



butterflyoflondon-clinic.com